


# 臺中榮民總醫院

## 醫療儀器二級保養維護標準作業準則

儀器名稱	急診推床	
廠牌	長庚	
型號	CS 型	
執行單位	工務或廠商	
保養週期	半年	
服務廠商	長庚醫學科技有限公司	
廠商電話	0978835849	
連絡人	何宗益	

### 一、安全注意事項

- (1) 使用前請務必先詳閱操作及維護說明，並遵照指示使用。
- (2) 本病床建議使用厚度 80 mm 以下之床墊。
- (3) 觀察床的驅動機構、床墊、床下及床邊地板上是否有棉絮積聚。
- (4) 測試床的升降移動是否順暢，且能完成升降行程，確保不會被其他物品卡住。
- (5) 測試第五輪是否可正常操作上升、下降。
- (6) 觀察電氣元件之保護蓋是否破裂或損壞，以防止液體或導電物進入。
- (7) 氣壓棒需定期檢查（建議每 6 個月檢查 1 次），必要時請更換。
- (8) 任何的移動式 RF 通訊設備靠近本產品時，可能會影響本產品之效能表現。
- (9) 不可於本產品上堆疊或放置其他電子設備，也不可靠近其他的電子設備，否則可能產生電磁干擾情形。
- (10) 若採用他牌配件，將會影響執行效能，另可能使得醫療電子設備無法符合安規要求或產生使用上的危害。
- (11) 如使用漂白水進行消毒擦拭，於擦拭結束後請立即以沾水潤濕之抹布擦拭消毒過之區域，並確保設備尚無殘留漂白水，待乾燥後上方才可覆蓋如床墊等部品。

### 二、保養應備工具

75%的酒精、抹布、螺絲起子、內六角扳手

### 三、二級保養維護標準流程

- (1) 檢查護欄及護欄制動拉桿有無磨損？
- (2) 檢查背部升降氣壓棒有無損壞？
- (3) 檢查床面升降液壓缸有無損壞？
- (4) 檢查腿部手搖桿有無損壞？
- (5) 檢查腳輪固定螺栓有無鬆脫？
- (6) 檢查中控腳踏板煞車功能是否正常？
- (7) 檢查床體外觀及各零組件有無損壞？

### 三、操作程序

(1) 檢查護欄及護欄制動拉桿有無磨損

- 有無裂痕
- 功能是否正常。

(2) 檢查背部升降氣壓棒有無損壞

- 測試背部升降功能是否正常。
- 以徒手檢查油壓缸外觀是否有漏油，目視檢查油壓缸襯套有無破損。

(3) 檢查床面升降液壓缸有無損壞

- 測試床面升降功能是否正常。
- 以徒手檢查油壓缸外觀是否有漏油，目視檢查油壓缸襯套有無破損。

(4) 檢查腿部手搖桿有無損壞

- 測試腿部手搖桿功能是否正常。

(5) 檢查腳輪固定螺栓有無鬆脫

- 腳輪是否有不正常的晃動

(6) 檢查中控腳踏板煞車功能是否正常

- 腳輪是否可被鎖定

(7) 檢查床體外觀及各零組件有無損壞